



Abri-Form *Premium*- liggend aanleggen

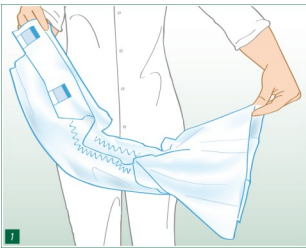

Vouw het product dubbel over de lengte zodat er een gootje ontstaat. Leg de cliënt op zijn/haar zij.

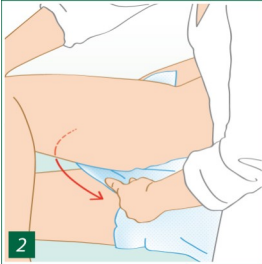

Houd het gootje vast en breng het product van voor naar achter tussen de benen door aan (tapes aan de rugzijde). Laat het product goed aansluiten in de liezen.



Strijk het product aan de achterzijde glad met de verzadigingsindicator parallel aan de bilnaad. Schuif de onderste zijflap onder het lichaam door naar voren. Let hierna de cliënt op zijn/haar rug.




Strijk het product aan de voorzijde horizontaal glad met de zijflappen naar achteren en de verzadigingsindicator in het midden.



Strijk de achterste flappen horizontaal strak naar voren. Bevestig de onderste tapes aan beide zijden schuin omhoog, zodat het product goed in de naad tussen de bovenbenen en billen aansluit.



Bevestig de bovenste tapes aan beide zijden naar beneden wijzend, zodat het product mooi aan het lichaam aansluit.

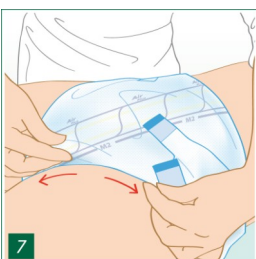

Zorg dat de randen van het product goed in de liezen aansluiten. Corrigeer, indien nodig, de tapes.