


Abri-Form *Premium*- stand aanleggen

ABENA®

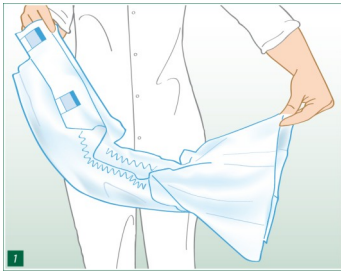


Vouw het product dubbel over de lengte zodat er een gootje ontstaat. Zorg dat de cliënt zo recht mogelijk staat.



Houd het gootje vast en breng het product van voor naar achter tussen de benen door aan (tapes aan de rugzijde). Zorg dat de verzadigingsindicator parallel aan de bilnaad loopt.




Strijk het product aan de voorzijde horizontaal glad met de zijflappen naar achteren. Fixeer alvast één tape willekeurig om afzakken te voorkomen.

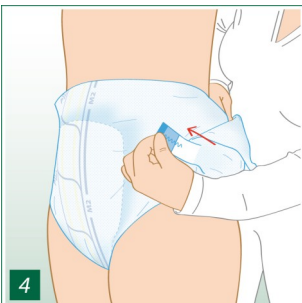

Bevestig de onderste tapes aan beide zijden schuin omhoog wijzend, zodat het product goed in de naad tussen de bovenbenen en billen aansluit.



Bevestig de bovenste tapes aan beide zijden naar beneden wijzend, zodat het product mooi aansluit aan het lichaam.

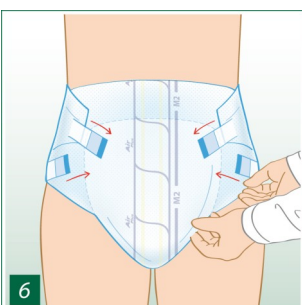

Controleer de aansluiting van het product rondom het been. Corrigeer, indien nodig, de tapes.