



Abri-Light *Premium*- zelf aanleggen

ABENA®

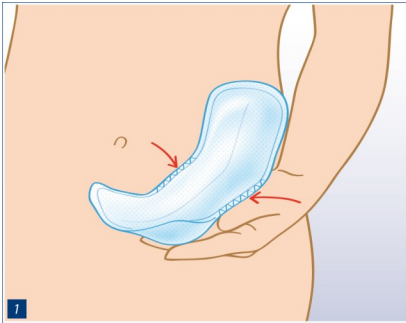


Vouw het product dubbel over de lengte zodat er een gootje ontstaat.

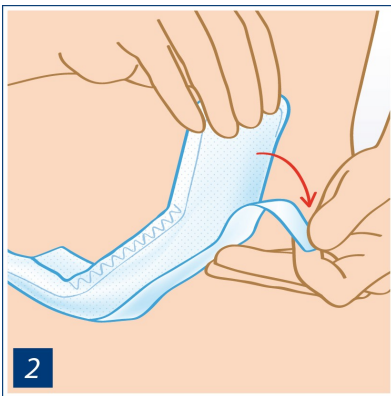

Verwijder de strip aan de achterzijde van het verband, zodat de hechtstrip zichtbaar wordt.



Plak het verband in een goed aansluitende onderbroek

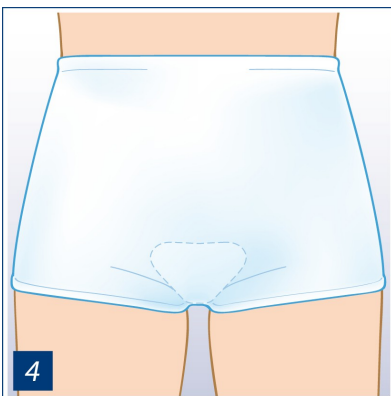

Trek het onderbroekje omhoog

Advies:

Gebruik aansluitend elastisch ondergoed met pijpjes.

Normaal ondergoed zonder pijpjes heeft een te smal kruisgedeelte voor het gebruik van incon-