

Abri-Man Special *Premium*- liggend aanleggen



Vouw de inlegger dubbel over de lengte zodat er een gootje ontstaat.
Tip: wij adviseren het breedste gedeelte van het product aan de voorzijde te dragen.



Trek het fixatiebroekje omhoog tot boven de knieën. Leg de cliënt op zijn/haar zij. Houd het gootje vast in je hand. Breng het product van voor naar achter tussen de benen door aan.



Strijk het product aan de achterzijde glad met de verzadigingsindicator parallel aan de bilnaad.



Trek het fixatiebroekje aan de achterzijde omhoog.



Let de cliënt op zijn/haar rug en strijk de voorzijde glad.



Trek het fixatiebroekje aan de voorzijde omhoog.



Zorg dat de broekrand over de beschermzijde heen loopt. Strijk de inlegger en het ondergoed glad.

Advies:

Gebruik aansluitend elastisch ondergoed met pijpjes of een fixatiebroekje.
Normaal ondergoed zonder pijpjes heeft een te smal kruisgedeelte voor gebruik van incontinentieproducten.