



Abri-Man Special *Premium*- staand aanleggen

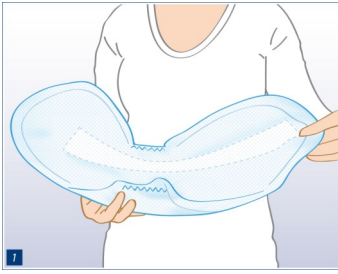

Vouw de inlegger dubbel over de lengte zodat er een gootje ontstaat. Tip: Wij adviseren het breedste gedeelte van het product aan de voorzijde te dragen.

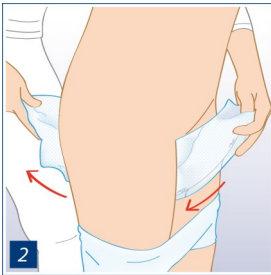

Zorg dat de cliënt zo recht mogelijk staat, eventueel met steun. Trek het fixatiebroekje omhoog tot over de knieën. Breng de inlegger van voren naar achteren tussen de benen door aan.



Let op dat de bovenkant van de grote inleggers aan de rugzijde ter hoogte van de stuit zit. Strijk de inlegger horizontaal glad en zorg dat er zich een gootje tussen de benen vormt.



Zorg dat de randen netjes naar buiten wijzen en de verzadigingsindicator parallel aan de bilnaad loopt.



Trek nu het fixatiebroekje er overheen omhoog. Let op dat de inlegger aan de achterzijde ook glad zit.



Zorg dat de broekrand over de beschermzijde heen loopt. Strijk de inlegger en het ondergoed glad.

Advies:

Gebruik aansluitend elastisch ondergoed met pijpjes of een fixatiebroekje.

Normaal ondergoed zonder pijpjes heeft een te smal kruisgedeelte voor gebruik van incontinentieproducten.