


Abri-Man *Premium*- zelf aanleggen

ABENA®



Vouw het product dubbel over de lengte zodat er een gootje ontstaat.

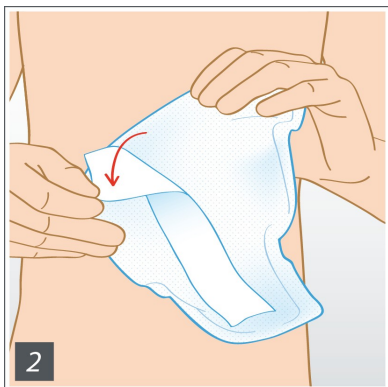

Verwijder de beschermstrip aan de achterzijde van het verband.



Plak het verband in een goed aansluitend fixatiebroekje en zorg dat de penis goed in het verband ligt, tussen de anti-lekrandjes.



Trek het fixatiebroekje omhoog

Advies:

Gebruik aansluitend elastisch ondergoed met pijpjes.

Normaal ondergoed zonder pijpjes heeft een te smal kruisgedeelte voor het gebruik van incontinentieproducten.