


Abri-Wing *Premium*- staand aanleggen



Vouw het product uit en trek de heupbanden open. Vouw het product dubbel over de lengte zodat er een gootje ontstaat.

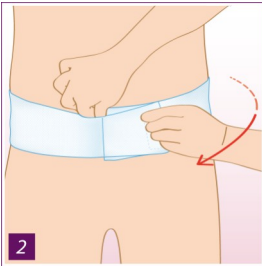


Maak de heupband rond het middel met de klittenbandsluiting vast. Zorg dat het product aan de achterzijde in het midden zit (verzadigingsindicator parallel aan de bilnaad).



Trek het product van achter naar voor tussen de benen door omhoog. Zorg ervoor dat het product goed aansluit in de liezen en dat zich een gootje tussen de benen vormt.



De cliënt mag eventueel gaan zitten. Maak de uiteinden met de klittenbandsluiting vast aan de heupband en corrigeer waar nodig.

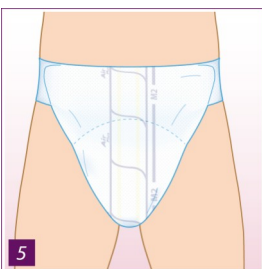

Controleer of het product goed in de liezen aansluit.

Abri-Wing *Special Premium*



De cliënt mag eventueel gaan zitten. Maak de uiteinden met de klittenbandsluiting vast aan de heupband en corrigeer waar nodig.



Bevestig vervolgens de extra tapes aan beide zijden schuin omhoog wijzend op de heupband, zodat het product mooi aansluit rondom het been.