

TENA *Pants*

TENA *Pants* is een verband en broekje in één voor zowel mannen als vrouwen.

Het draagt en voelt als gewoon ondergoed, maar beschermt optimaal. Er zijn in totaal 18 varianten verkrijgbaar in vijf absorptieniveaus en diverse maten:


TENA *Pants* Discreet, TENA *Pants* Normal, TENA *Pants* Plus, TENA *Pants* Super en TENA *Pants* Maxi.

Body-Close Fit: voor een perfecte pasvorm en een zekerder gevoel in alle denkbare situaties thuis en buitenshuis, overdag en 's nachts

Zijzaden kunnen worden opengescheurd om het product gemakkelijk te kunnen verwijderen

Dun en zacht waardoor comfortabel en discreet. Draagt en voelt als gewoon ondergoed

Air Dry Layer: zacht ademend materiaal voor discretie en verhoogd comfort

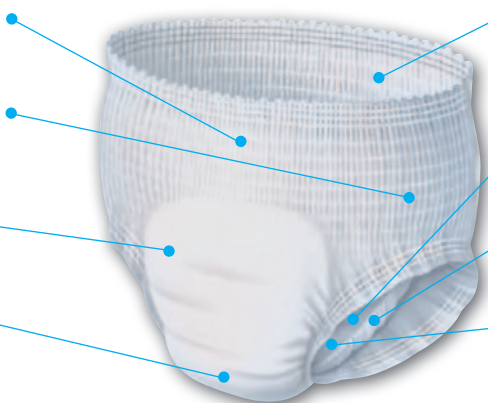

Kleurcodering in tailleband: voor een gemakkelijke herkenning van het absorptieniveau*

Odour Control: gaat ontwikkeling van geurtjes tegen**

Security Barrier: opstaande vochtafstotende randjes minimaliseren kans op doorlekken***

FeelDry**** en Dry Fast Core: snellere en betere opname voor minder huidirritatie

* Niet bij TENA *Pants* Discreet, TENA *Pants* Normal en TENA *Pants* Plus XXS en XS ** Alleen bij TENA *Pants* Discreet
*** Alleen bij TENA *Pants* Plus, Super en Maxi **** Niet bij TENA *Pants* Discreet en TENA *Pants* Plus XXS en XS



Voor wie en wanneer is TENA *Pants* geschikt?




- Voor mannen en vrouwen:
 - met een zekere mobiliteit die onafhankelijkheid belangrijk vinden
 - met een slechte handfunctie
 - die liever een broekje dragen
 - die bezig zijn met toilettraining
 - met een verstandelijke handicap die zelf naar het toilet kunnen
- Voor plukkers/prutsers
- Voor kinderen die bedplassen: TENA *Pants* Plus Extra Extra Small en TENA *Pants* Plus Extra Small
- Bij aandrang-, meng-, druppelincontinentie en neurologische incontinentie*****
- Bij correcte productkeuze volstaat het aantal van 2 producten per dag. Ligt dit aantal hoger, dan adviseren wij u een meer absorberend product te kiezen

Volgens TENA is dit de meest optimale keuze. De uiteindelijke keuze wordt bepaald door het belang dat wordt gehecht aan de factoren: de drager, het verzorgend personeel, de prijs en het milieu.

***** Meer informatie over de verschillende vormen van incontinentie vindt u achter het tabblad 'Incontinentie'.


www.TENA.nl

De TENA *Pants* verbanden op een rij

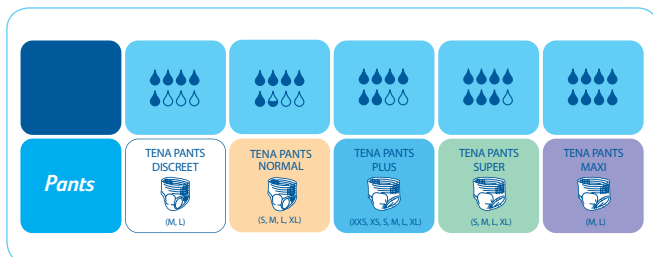

De beste manier om TENA *Pants* aan te trekken

1. Kies de kleur afhankelijk van het benodigde absorptievermogen. De kleur is aangegeven door middel van het elastiek aan de achterkant van het product en geeft het absorptieniveau aan. Bij TENA *Pants* Plus is het elastiek blauw, bij TENA *Pants* Super is het elastiek groen, bij TENA *Pants* Maxi is het elastiek paars. Bij TENA *Pants* Discreet en TENA *Pants* Normal blijft het elastiek wit.
2. Kies de maat aan de hand van de heupomvang. De plakstrip geeft de maat en de achterzijde van het verband aan. De maatkeuze is afhankelijk van de omvang van de persoon:

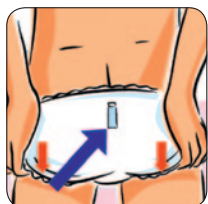

2

TENA *Pants* Discreet

- Medium (75 - 100 cm)
- Large (95 - 125 cm)

TENA *Pants* Normal

- Small (65 - 85 cm)
- Medium (80 - 110 cm)
- Large (100 - 135 cm)
- Extra Large (120 - 160 cm)

TENA *Pants* Plus

- Extra Extra Small (40 - 70 cm)
- Extra Small (50 - 70 cm)
- Small (65 - 85 cm)
- Medium (80 - 110 cm)
- Large (100 - 135 cm)
- Extra Large (120 - 160 cm)

TENA *Pants* Super

- Small (65 - 85 cm)
- Medium (80 - 110 cm)
- Large (100 - 135 cm)
- Extra Large (120 - 160 cm)

TENA *Pants* Maxi

- Medium (80 - 110 cm)
- Large (100 - 135 cm)



3

3. TENA *Pants* is net zo eenvoudig aan- en uit te trekken als gewoon ondergoed.



4

4. Verwijder het gebruikte verband door de zijnaden open te scheuren.



5

5. Rol het verband na gebruik op, plak het vast met behulp van de plakstrip* op de achterzijde van het verband en gooi het weg.

* TENA *Pants* Discreet, TENA *Pants* Normal, TENA *Pants* Plus XXS en TENA *Pants* Plus XS hebben geen plakstrip.